

NASENSPÜLUNG - Rhino Clear (Ergo Plus)

S

ACO702P

x3

WEICHE ADAPTER



Rhino Clear (Nasenspülung) - S-ACO702P

Rhino Clear® Ergo Plus ist die schnelle und effektive Möglichkeit, die Nasenhöhlen und den Nasenrachenraum mit physiologischen Lösungen zu spülen und medikamentös zu behandeln. Verwendbar mit jedem Aerosol-FLAEM-Gerät.

- Physiologische Spülung der Nasenhöhle
- Therapeutisches Waschen
- Helfen Sie Kindern, gut zu atmen
- 3 weiche Adapter (Adapter „A“ für Kinder bis 3 Jahre, Adapter „B“ für Kinder von 3 bis 12 Jahren und Adapter „C“ für alle über 12 Jahre)
- Sanfte Steuerung zum Starten/Stoppen des Sprühens während der Therapie

Frei von BPA und Phthalaten



 **PHthalates & BPA FREE**

Since 1966
 **FLAEM**®
 Medical Devices



EAN 8018294013370

Art.-Nr.: 01337

CE
0051

Mehr Infos unter www.scala-electronic.de

Rev.: 08.03.2023

Zertifiziertes Produkt nach der EU-Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte

NASENSPÜLUNG - Rhino Clear (Ergo Plus)

S ACO702P

Technische Spezifikationen

Betriebsbedingungen	
Temperatur	min 10°C ; max 40°C
Relative Luftfeuchtigkeit	min 10% ; max 95%
Luftdruck	min 69 KPa ; max 106 KPa
Kapazität	Medikament max 10ml
Lagerbedingungen	
Temperatur	min -25°C ; max 70°C
Relative Luftfeuchtigkeit	min 10% ; max 95%
Luftdruck	min 69 KPa ; max 106 KPa
Anwendungsteile vom Typ BF sind	Patientenzubehör (1A-1B-1C)
Zertifizierungen	In Übereinstimmung mit der Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG und folgenden Änderungen. Erfüllt: Europäische Norm EN 10993-1 „Biologische Beurteilung von Medizinprodukten“ und Europäische Richtlinie 93/42/EWG „Medizinprodukte“ Phthalatfrei. In Übereinstimmung mit Reg. (EG)-Nr. 1907/2006



Technische Eigenschaften der Vernebelung

Vernebelt 10 ml Lösung in ca. 2 Minuten

Ausgestattet mit einer Verneblerkammer, die mit max. 10 ml Lösung gefüllt werden kann

Er vernebelt die Lösung und entfernt Sekrete, Staub und Schadstoffe, die sich in den Nasennebenhöhlen angesammelt haben, und sammelt sie in einer speziellen Kammer

Es verfügt über einen praktischen Druckknopf zur Steuerung der Vernebelung

Es kann mit der gesamten Palette pneumatischer Kompressoren von Flaem und jedem anderen handelsüblichen pneumatischen Kompressor für die Aerosoltherapie verwendet werden

EINFACHE ANWENDUNG Es kann mit Salzlösungen (isotonische, hypertonsche, Liposomenlösungen usw.), Thermalwasser oder in Apotheken erhältlichen Medikamenten verwendet werden

Hergestellt aus biokompatiblen, nicht allergenen und ungiftigen Materialien

Es ist mit 3 Nasenadaptern ausgestattet

Logistische Details

Gerätengewicht	56 gr
Maße	6cm x 13 cm x 5 cm
Einzelpaketgewicht	120 gr
Einzelpaketabmessungen	16 cm x 6,5 cm x 5,5 cm
Umkarton	Stücke

 Made in Italy

EAN 8018294013370

Art.-Nr.: 01337

CE
0051

Mehr Infos unter www.scala-electronic.de