

GEBRAUCHSANWEISUNG DE

[Europäische Norm] DIN EN 455
 [Handelsname] Untersuchungshandschuhe aus Nitril
 [Artikelnummer] KS-ST RT021
 [Spezifikation] XS\SM\L\XL

Größe	Durchschnittliche Länge (in mm)	Durchschnittliche Breite (in mm)
XS	≥240mm	≤80
S		80±10
M		95±10
L		110±10
XL		≥110

[Farbe] Blau
 [Bestimmungsgemäße Verwendung] Die Nitril-Untersuchungshandschuhe werden von dem Gesundheitspersonal eingesetzt, um eine Kontamination bei engem Kontakt mit dem Patienten zu verhindern. Die Produkte sind zum einmaligen Gebrauch, puderfrei und unsteril.

- [Anweisungen]
- Nehmen Sie einen Handschuh aus der Verpackung und prüfen Sie, ob er ein Nadelloch oder einen Riss hat.
 - Sie können sie tragen, ohne zwischen linker und rechter Hand zu unterscheiden; im Gegenteil, bitte richten Sie den Daumen und die anderen Finger der Handschuhe vor dem Tragen richtig aus.
 - Stecken Sie die fünf Finger in die Stulpen und ziehen Sie dann die Manschette bis zum Handgelenk.
 - Prüfen Sie, ob die Finger und die Handfläche eng anliegen. Die Manschette sollte dicht am Handgelenk anliegen.

- [Vorsichtsmaßnahmen]
- Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, um die Nitril-Untersuchungshandschuhe richtig zu verwenden.
 - Die Handschuhe dürfen nicht wiederaufbereitet oder wiederverwendet werden, sie sind nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt.
 - Wenn die Handschuhe während der Untersuchung beeinträchtigt werden, waschen Sie sich gründlich die Hände und wechseln Sie die Handschuhe.
 - Verwenden Sie keine beschädigten Handschuhe.
 - Dieses Produkt sollte nicht in Kontakt mit Ölen, Säure, Sand und/oder Chemikalien verwendet werden.
 - Tragen Sie keine Ringe und schneiden Sie die Nägel, um ein Schneiden und/oder Zerkratzen des Handschuhs zu vermeiden.
 - Beim Auftreten von allergischen Reaktionen den Gebrauch einstellen und einen Arzt konsultieren.
 - An einem gut belüfteten, kühlen und trockenen Ort lagern und übermäßige Hitze (40°C) vermeiden.
 - Die offene Schachtel vor direkter Sonneneinstrahlung und längerer direkter Leuchtstoffröhren-Beleuchtung schützen.
 - Vor Ablauf des Verfallsdatums verwenden.
 - Ordnungsgemäß gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung medizinischer Abfälle entsorgen.

[Haltbarkeit] 3 Jahre
 [Lager- und Transportbedingungen] Das Paket muss in einem Raum mit einer normalen Temperatur unter 40 °C, ohne korrosive Gase, mit guter Belüftung und mit Einrichtungen zur Vermeidung von Feuer, Ratten und Insekten gelagert werden.
 Halten Sie es während des Transports von Feuchtigkeit, Licht und Hitze fern.
 [Verpackung] 100 St./nach Gewicht
 [Herstellungsdatum] Siehe Verpackung
 [Lotnummer] Siehe Verpackung
 [Haltbarkeitsdatum] Siehe Verpackung



GUANGDONG KINGFA SCI. & TECH. CO., LTD.
 NO.28, Delong Avenue, Shijiao Town, Qingcheng District, Qingyuan City, Guangdong Province, China
 TEL: +86(020)-6681-8888
 EMAIL: medical@kingfa.com.cn
 WEB: www.medicalkingfa.com



Share Info GmbH
 Heerdter Lohweg 83, 40549 Düsseldorf

SYMBOLERKLÄRUNG

No.	Symbole	Bezeichnung
1		Symbol für das CE-Zeichen. Dieses Symbol bescheinigt, dass ein Produkt die Sicherheits-, Gesundheits- oder Umweltaanforderungen der Europäischen Union für Verbraucher erfüllt.
2		Gibt den Hersteller des Medizinprodukts an.
3		Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft.
4		Herstellungsdatum.
5		Haltbarkeitsdatum.
6		Lotnummer.
7		Artikelnummer.
8		Unsteril.
9		Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
10		Vor Sonnenlicht schützen.
11		Trocken aufbewahren.
12		Temperaturbereich der Lagerbedingungen.
13		Nicht wiederverwendbar.
14		Zeigt an, dass der Benutzer die Gebrauchsanweisung beachten muss.
15		Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln.
16		Diese Seiten nach oben.
17		Zerbrechlich, mit Vorsicht behandeln.
18		Maximale Anzahl von Stapelsteinheiten.
19		Das Produkt enthält keinen Latex.
20		Medizinisches Gerät